

AUDISPRAY ADULT - PZN 08468984

Für die sanfte Reinigung des äusseren Gehörgangs
Ab 12 Jahren

Für die Ohrenhygiene
100% gereinigtes Meerwasser
50 ml
Reinigt sanft die Ohren mit innovativem, einzigartigem Sprühaufsatz mit eingebautem Überdruckschutz



100% natürliche Meerwasserlösung, wirksam und 100% verträglich

AUDISPRAY ADULT enthält eine hypertone, mikrobiologisch kontrollierte Meerwasserlösung. AUDISPRAY ADULT ist eine Alternative zu Wattestäbchen.

AUDISPRAY ADULT weicht und löst das Ohrenschmalz auf und fördert so die natürliche Ausscheidung nach aussen, Richtung Ohrmuschel.

Regelmässig angewendet beugt AUDISPRAY ADULT der Ansammlung von Ohrenschmalz und Verunreinigungen im Gehörgang vor. AUDISPRAY ADULT enthält kein Treibgas und ist mit einem Überdruckschutz am Sprühkopf ausgestattet, der eine regelmäßige und wirksame Reinigung ermöglicht.

Wie wird AUDISPRAY angewendet?

Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene: 1 bis 2 Sprühstöße pro Ohr zweimal wöchentlich. Bei Trägern von Hörgeräten empfiehlt es sich, AUDISPRAY ADULT jeden Abend nach dem Entfernen des Hörgeräts anzuwenden, damit das Ohrenschmalz die Funktionsfähigkeit des Hörgeräts nicht beeinträchtigt.

1. Setzen sie den Sprühkopf am Eingang des Gehörgangs an und sprühen Sie ein- bis zweimal in jedes Ohr. Halten Sie die Sprühflasche dabei aufrecht.
2. Massieren Sie den Ohrenansatz einige Sekunden lang.
3. Neigen Sie den Kopf zur Seite, um überschüssige Flüssigkeit auslaufen zu lassen und abzuwischen.
4. Spülen Sie den Sprühkopf nach jeder Anwendung mit warmem Wasser.



Gegenanzeigen

Nicht anwenden bei Mittelohrentzündung, Trommelfellperforation und im Allgemeinen Personen, die eine Vorgeschichte mit Ohrenleiden (Schwindel, medizinische oder chirurgische Eingriffe ...) haben oder hatten.

AUDISPRAY ist ein mit der Europäischen Richtlinie 93/42/EWG konformes Medizinprodukt.

Lesen Sie vor der Anwendung den Beipackzettel oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

E-Mail: info@diepharmex.com – www.audispray.com