

# tri.balance® pH-Teststreifen

## pH-Teststreifen – zur Kontrolle des pH-Werts

Ob eine Übersäuerung besteht, lässt sich mit den tri.balance® pH-Teststreifen sehr schnell erkennen. Befindet sich der Säure-Basen-Haushalt im Gleichgewicht, so liegt der pH-Wert des Körpers bzw. Urins bei pH 7,4.

Zeigt der pH-Teststreifen einen niedrigeren Wert an, so ist der Säure-Basen-Haushalt übersäuert – und es sollten entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden, damit der Säure-Basen-Stoffwechsel wieder normal funktionieren kann.

Messen Sie mit tri.balance® pH-Teststreifen schnell und unkompliziert Ihren pH-Wert und prüfen Sie, ob Ihr Säure-Basen-Haushalt ausgeglichen ist. Unsere Teststreifen sind ideal, um erste Hinweise auf eine Übersäuerung zu erhalten oder auch, um im Zuge einer Entsäuerung die Entwicklung zu begleiten und zu prüfen.

## Produktmerkmale

- Messbereich ideal auf den menschlichen Urin abgestimmt.
- Schnelle und einfache Anwendung
- Genaue, verlässliche Messergebnisse
- Farbige Messtabelle zum ablesen des Messwerts

## Anwendung

Den Teststreifen ca. 1 Sekunde so in die Urinprobe eintauchen, dass das farbige Testfeld benetzt ist. Anschließend die Farbe des feuchten Testfeldes innerhalb von 1 Minute mit der Farbskala vergleichen (im günstigsten Fall nach 5-10 Sekunden) und unterhalb des Farbtones, welcher der Verfärbung des Teststreifens am nächsten kommt, den pH-Wert ablesen.

Zwischenwerte können geschätzt werden (Genauigkeitsgrenze +/- 0,2 pH). Ein Ablesen nach mehr als 2 Minuten liefert keine richtigen Ergebnisse.

**PZN - Artikelnummer** 07252236 / **Stückzahl** 99 St.

**PZN - Artikelnummer** 11100101 / **Stückzahl** 22 St.

Hergestellt in Deutschland

## Hersteller

tri.balance® base products  
Herrenberg 7  
89312 Günzburg / Deutschland