

Text Versandapotheken Wortie® spezial

Wortie® spezial

Wortie® spezial zur einfachen und sicheren Entfernung von Stielwarzen zu Hause. Mit Präzisionsapplikator und selbstklebenden Fixierungsrings.

Produktbeschreibung:

Mit Wortie® spezial lassen sich Stielwarzen sicher und bequem zu Hause entfernen. **Wortie® spezial** nutzt dabei die bewährte Kryotherapie. Mit innovativer Technik vereist es Stielwarzen einfach und schnell.

Für eine besonders einfache Anwendung liegen jeder Packung **Wortie® spezial** selbstklebende **Fixierungsringe** bei. Sie stabilisieren die Warze für eine präzise Behandlung. Der **Präzisionsapplikator** mit zylindrischer Spitze passt zielgenau auf den Fixierungsrings und schützt umliegende Hautareale vor versehentlicher Vereisung.

Zur Behandlung wird der Fixierungsrings auf die Haut um die Stielwarze geklebt. Nach der Aktivierung wird der Präzisionsapplikator für 40 Sekunden auf die Stielwarze gesetzt. Nach 10 bis 14 Tagen fällt die zuvor vereiste Warze ab und wird durch glatte, gesunde Haut ersetzt.

