

v-code:
5098
5098

GEBRAUCHSANLEITUNG 

optive® GEL DROPS

v-code:
5098
5098

Ein spezielles Benetzungsgel in Tropfenform für schnelle Hilfe bei Symptomen des trockenen Auges. Für Augenwohlgefühl und anhaltenden Schutz. Lang andauernde Hilfe für Tag und Nacht.

Zweifach wirksames, benetzendes und osmoprotektives Gel in Tropfenform

Beschreibung:

OPTIVE® Gel Drops ist eine sterile Lösung in einem Mehrdosenbehältnis, die 1 % Natriumcarboxymethylcellulose, 0,9 % Glycerol, Erythritol, Levocarnitin, Borsäure, Natriumtetraborat-Decahydrat, Natriumcitrat-Dihydrat, Kaliumchlorid, Calciumchlorid-Dihydrat, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, gereinigtes Wasser und 0,01 % des Konservierungsmittels PURITE® enthält, das auf dem Auge in natürliche Bestandteile der Tränenflüssigkeit zerfällt.

OPTIVE® Gel Drops ist zur Anwendung mit allen Arten von Kontaktlinsen geeignet und kann nach dem Öffnen 3 Monate verwendet werden.

Gebrauchsanweisung

Nach Bedarf 1 oder 2 Tropfen in das/die Auge(n) geben.

Vorsichtshinweise

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe allergisch reagieren
- Lösung nicht einnehmen
- Um Verunreinigungen oder mögliche Augenverletzungen zu vermeiden, sollten Sie die Tropferspitze nicht berühren und direkten Kontakt mit dem Auge vermeiden
- Die Tropfflasche unmittelbar nach dem Gebrauch fest verschließen
- Lösungsreste 3 Monate nach dem Öffnen verwerfen
- Das Produkt kann vorübergehend verschwommenes Sehen verursachen
- Nicht nach Ablauf des auf dem Produkt angegebenen Verfalldatums benutzen

- Für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Bei Raumtemperatur aufbewahren
- Verwenden Sie die Tropfflasche nicht, wenn die Versiegelung des Verschlusses vor dem ersten Öffnen beschädigt ist
- Nicht verwenden, wenn sich die Farbe der Lösung verändert hat
- Bei der Verwendung zusammen mit anderen Augenprodukten sollten zwischen den Anwendungen mindestens 15 Minuten liegen

Warnhinweise

Wenn Sie Augenschmerzen bekommen, sich das Sehvermögen verändert, anhaltende Rötung oder Augenreizungen auftreten oder sich Ihr Zustand verschlechtert, dann beenden Sie bitte die Anwendung und suchen Sie einen Arzt auf.

Wie ist das Produkt erhältlich?

OPTIVE® Gel Drops ist in Kunststoff-Tropfflaschen mit 2 ml (unverkäufliche Probe) oder 10 ml erhältlich.



Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road
Westport, Co. Mayo
Irland

 0344 STERILE | A

 Allergan.

72615EW12