



## ANWENDUNGSHINWEISE ZU DUREX PERFORMA KONDOMEN

### KONDOME AUS NATURKAUTSCHUKLATEX, ENTHÄLT EINE MEDIZINISCHE SUBSTANZ



Jeder Mensch ist anders, aber ein Kondom sollte für alle stets bequem und sicher sein.

Bitte lies alle Hinweise vor der Verwendung aufmerksam durch, insbesondere, wenn du Kondome für Anal- oder Oralsex benutzt. Denke daran, dass keine Verhütungsmethode zu 100 % vor Schwangerschaft, HIV oder sexuell übertragbaren Krankheiten schützt. Kondome können eine Erstickungsgefahr darstellen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

### DUREX QUALITÄT

Unsere Kondome durchlaufen 5 Qualitätstests. Zudem ist jedes einzelne Kondom zu 100 % elektronisch geprüft.

### UNSER TIPP FÜR DICH

Damit du das Kondom gleich richtig herum aus der Folie nimmst und überziehen kannst, halte die Folie beim Öffnen mit dem Durex Logo nach unten.

### BEVOR IHR ANFANGT

Überprüfe vor der Verwendung das Verfallsdatum auf der Verpackung. Ist die Kondomfolie offensichtlich beschädigt, wirf das Kondom weg und benutze ein neues aus einer unbeschädigten Verpackung. Ziehe das Kondom über, bevor der Penis die andere Person berührt. Dies hilft, eine Schwangerschaft zu verhindern und reduziert die Gefahr einer Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten.

### WICHTIGE INFORMATIONEN ZU DUREX PERFORMA

Das enthaltene benzocainhaltige Gel in der Kondomspitze kann dabei helfen, die Zeit bis zum Samenerguss zu verlängern. Bei manchen Menschen kann dieses benzocainhaltige Gel einen Ausschlag, Reizung, Brennen oder Juckreiz verursachen. Sollte dies der Fall sein, Kontakt mit Augen, gereizter Haut und Wunden vermeiden und nach der Anwendung abwaschen. Das Produkt nicht mehr anwenden. Wenn keine Besserung eintritt, sollte ein Arzt aufgesucht werden. **STOPPE SOFORT DIE VERWENDUNG UND RUF EINEN ARZT AN:** Wenn du oder dein(e) Partner(in) bei der Verwendung des Kondoms Atembeschwerden haben oder blaue Lippen bekommen. Vorzeitiger Samenerguss ist ein häufiges Problem, das viele Ursachen haben kann und möglicherweise ärztliche Beratung/Überwachung erfordert. Wenn diese Kondome nicht helfen, solltest du deinen Arzt konsultieren.

Denke daran, dass keine Verhütungsmethode zu 100 % vor Schwangerschaft, HIV oder sexuell übertragbaren Krankheiten schützt. Kondome können eine Erstickungsgefahr darstellen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

### SO BENUTZT DU DAS KONDOM



Reiße die Verpackung an der gezackten Kante auf. Sei vorsichtig, Fingernägel oder scharfe Gegenstände können das Kondom beschädigen.



Halte das Kondom mit dem aufgerollten Rand nach außen, drücke das Reservoir zusammen und setze das Kondom auf die Spitze des erigierten Penis auf.



Rolle das Kondom vollständig bis zum Schaft ab. Wenn sich das Kondom nicht abrollen lässt, ist es möglicherweise verkehrt herum aufgesetzt – entsorge dieses und verwende ein neues. Prüfe, ob es abrutscht oder zu fest sitzt, da dies das Kondom beschädigen kann. Das Kondom so bald wie möglich nach der Ejakulation abstreifen. Halte das Kondom am Schaft fest, bevor der Penis herausgezogen wird.



Wirf die Folie und das benutzte Kondom in einen Mülleimer, nicht ins WC.

## **WANN BERATUNG NOTWENDIG IST**

Sprich mit einem Arzt oder Apotheker, wenn du dir nicht sicher bist, ob eine Latexallergie besteht, nach Verwendung Reizungen oder Unwohlsein auftreten, oder du Medikamente verwendest, die lokal auf Penis oder Vagina aufgetragen werden. Wenn ein Kondom beim Sex ausläuft oder platzt, konsultiere so bald wie möglich (spätestens innerhalb von 72 Stunden) einen Arzt oder Apotheker.

Schwerwiegende Vorfälle können Reckitt und der zuständigen Behörde vor Ort gemeldet werden, die dann weitere Ratschläge erteilen.

## **WARNHINWEISE**

Dieses Kondom besteht aus Naturkautschuklatex und kann bei Latex-Allergikern allergische Reaktionen bis hin zu einem anaphylaktischen Schock auslösen.

## **STOPPE DIE BENUTZUNG:**

Wenn du während der Benutzung Unwohlsein oder Reizungen verspürst. Benutze jedes Kondom nur einmal. Eine Wiederverwendung erhöht das Risiko einer Beschädigung oder Infektion. Kondome können eine Erstickungsgefahr darstellen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Wenn du das Kondom zunächst für Oralsex benutzt, verwende für jede folgende Sexpraktik ein neues Kondom. Benutze nur Gleitmittel, die für die Verwendung mit Kondomen empfohlen werden. Gleitmittel auf Ölbasis (Vaseline, Babyöl und einige vaginalzäpfchen) sowie einige Medikamente zur äußeren Anwendung, die auf Penis oder Vagina aufgetragen werden, können Kondome beschädigen. Benutze für Analsex zusätzliches Gleitgel auf der Außenseite des Kondoms (kein Durex Prickelnd).

## **LAGERHINWEISE**

Trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

CE  
2409

**Reckitt Benckiser Deutschland GmbH, Darwinstrasse 2-4, 69115 Heidelberg**

Für mehr Infos besuche [www.durex.de](http://www.durex.de)



@durex.de

## ERKLÄRUNG DER HINWEISSYMBOLS AUF DER VERPACKUNG

	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden		Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
	Medizinprodukt		Trocken lagern
	Bitte Anwendungshinweise beachten		Enthält Naturkautschuklatex
	Achtung		Hersteller: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull, East Yorkshire, HU8 7DS, UK
	Verfallsdatum. Produkt nicht verwenden, wenn dieses Datum überschritten wurde		Chargennummer
	Nicht wiederverwenden		Enthält eine medizinische Substanz