

AUDISPRAY ULTRA - PZN 15251630

Zersetzt und löst Ohrenpfropfen im äusseren Gehörgang
Ab 3 Jahren

Für die Beseitigung von Ohrenschmalzpfropfen
20 ml
Inhaltsstoffe: Natriumdioctylsulfosuccinat, Ethoxydiglycol, gereinigtes Wasser.
Das Dokusat-Natrium löst die Bestandteile des Ohrenschmalzpfropfens auf.
Das Ethoxydiglycol löst die Lipide im Ohrenschmalz auf.
Behandlung von Ohrenpfropfen oder grösseren Ansammlungen von Ohrenschmalz als Selbstmedikation zu Hause und erleichtert die Entfernung von Ohrenpfropfen durch den Arzt.



Anwendung von AUDISPRAY ULTRA:

Zur Beseitigung von Ohrenpfropfen oder grösseren Ansammlungen von Ohrenschmalz:
2 Sprühstöße zweimal täglich, bis die Beschwerden beseitigt sind.

Vor der Extraktion eines Ceruminalpfropfens durch den Arzt:
15 bis 30 Min. vor der Behandlung 4 Sprühstöße in den Gehörgang geben

Gegenanzeigen

Kontakt mit Schleimhäuten, insbesondere mit der Augenschleimhaut, vermeiden; bei Kontakt sofort mit reichlich Wasser spülen.

Nicht anwenden bei Mittelohrentzündung, Trommelfellperforation und im Allgemeinen Personen, die eine Vorgeschichte mit Ohrenleiden (Schwindel, medizinische oder chirurgische Eingriffe ...) haben oder hatten.

Nicht anwenden im Falle einer Allergie gegen einen der genannten Bestandteile.

AUDILYSE ist ein mit der Europäischen Richtlinie 93/42/EWG konformes Medizinprodukt.

Lesen Sie den Beipackzettel vor der Anwendung oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

E-Mail: info@diepharmex.com – www.audispray.com

