



Warzen-Ex-Pflaster

Medizinprodukt

Was ist eine Warze?

Warzen sind gutartige Wucherungen an der Oberhaut, die vor allem an Fingern, Fußsohlen, im Gesicht oder im Genitalbereich auftreten können. Es gibt verschiedene Arten von Warzen, wobei fast alle durch eine Infektion mit humanen Papilloviren (HPV) hervorgerufen werden.

Das SOS Warzen-Ex-Pflaster ist zur Behandlung von gewöhnlichen Warzen geeignet.

Wie lässt sich eine Infektionsausbreitung und eine Ansteckung vermeiden?

Auslöser für gewöhnliche Warzen ist eine Infektion mit humanen Papilloviren (HPV). Die Übertragung erfolgt durch Kontakt- und Schmierinfektion. Die Erreger werden häufig über eine Kontaktinfektion direkt von Mensch zu Mensch übertragen. Über winzige Risse oder Verletzungen können die Viren in die oberste Hautschicht eindringen (Schmierinfektion). Zwischen Ansteckung und dem ersten Auftreten der Warze (Inkubationszeit) können vier Wochen bis acht Monate vergehen. Nicht immer bricht das Virus aus.

Nach einer Infektion erhöht sich jedoch das Risiko für zukünftige Ausbrüche.

Verschiedene Faktoren begünstigen das Entstehen einer Warze: Personen mit leicht schwitzenden Füßen, keinen atmungsaktiven Schuhen oder feuchten Händen leiden häufiger an Warzen. Das Risiko wird durch ein schwaches Immunsystem, Allergien, Durchblutungsstörungen, Diabetis, Stress und eine angegriffene Haut (bspw. Neurodermitis) erhöht.

Was ist das SOS Warzen-Ex-Pflaster und wofür wird es verwendet?

Das SOS Warzen-Ex-Pflaster entfernt gewöhnliche Warzen effektiv und gleichzeitig schonend. Das wasserfeste Pflaster wird direkt auf die betroffene Stelle an Händen und Füßen geklebt, wo es bis zu 12 Stunden wirkt und

gleichzeitig Schutz vor einer Infektionsausbreitung bietet. Die verhornte Hautschicht der Warze wird durch die hochkonzentrierte Salicylsäure aufgeweicht und nach und nach abgetragen, bis die Infektion beseitigt ist.

Das Pflaster ist dünn und flexibel, was für ein besonders angenehmes Tragegefühl und ein dezentes Erscheinungsbild sorgt.

SOS Warzen-Ex-Pflaster zeichnet sich besonders durch eine leichte und schonende Entfernung aus und ist somit auch ideal zur Anwendung bei Kindern ab 6 Jahren sowie für empfindliche Hände und Füße geeignet.

Was müssen Sie vor der Verwendung des SOS Warzen-Ex-Pflaster beachten?

Das Warzen-Ex-Pflaster kann sowohl bei Kindern ab 6 Jahren als auch bei Erwachsenen angewendet werden. Bei Säuglingen und Kindern unter 6 Jahren darf das SOS Warzen-Ex-Pflaster nicht angewendet werden.

Nur zur äußeren Anwendung. Nur auf Bereichen verwenden, die von Fuß- oder anderen Warzen befallen sind.

Verwendung bei Schwangerschaft und Stillzeit

Bitte fragen Sie Ihren Arzt.

Wie ist das SOS Warzen-Ex-Pflaster anzuwenden?

Waschen Sie sich vor dem Anbringen des SOS Warzen-Ex-Pflasters sorgfältig die Hände. Das Pflaster ist auf sauberer und trockener Haut anzuwenden. Vor dem Aufkleben die Schutzschicht des Pflasters entfernen und das Pflaster sorgfältig an der zu behandelnden Stelle andrücken.

Das SOS Warzen-Ex-Pflaster nach 12 Stunden ersetzen. Bei jedem Pflasterwechsel wird empfohlen die obere, aufgeweichte Hautschicht (bspw. mit Hilfe eines sauberen zur Hygiene verwendeten Gegenstandes) zu entfernen.



Anwendungsgebiet:

Zur effektiven und schonenden Entfernung gewöhnlicher Warzen. Das SOS Warzen-Ex-Pflaster schützt vor äußeren Einflüssen, hält den Bereich um die Warze während des Heilungsprozesses feucht und begünstigt dadurch auch das Weichwerden der Haut, was die mechanische Entfernung der Warze erleichtert. Durch diese besondere Wirkung kann das SOS Warzen-Ex-Pflaster das entstehende Mikroklima ohne den Einsatz von Arzneimitteln unter Kontrolle halten.

Das SOS Warzen-Ex-Pflaster ist dermatologisch getestet und zur Anwendung bei Kindern ab 6 Jahren sowie für empfindliche Hände und Füße geeignet.

Anwendungszeitraum:

Das Warzen-Ex-Pflaster muss alle 12 Stunden ersetzt und die bereits aufgeweichte Haut gelöst werden. Die Anwendung so lange wiederholen, bis die Warze komplett entfernt werden konnte.

Hinweise:

Zur örtlichen Anwendung.
Dermatologisch getestet.

Warnhinweise:

Nur zur äußeren Anwendung. Nur auf Bereichen verwenden, die von Fuß- oder anderen Warzen befallen sind. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Die Gebrauchsanleitung aufmerksam lesen. Die Behandlung im Fall von Nebenwirkungen oder Überempfindlichkeit gegen das Produkt abbrechen. Funktionsweise und Sicherheit des Produkts werden durch die Unversehrtheit der Verpackung garantiert.

Lagerung:

Das Produkt in der Originalpackung an einem sauberen, trockenen und kühlen Platz aufbewahren.

Inhalt: 24 Pflaster



Bedeutung der Symbole auf Packung:

- Hersteller
- Chargenbezeichnung
- Nicht wiederverwenden
- Verwendbar bis
- Bitte Gebrauchsanweisung beachten
- Trocken lagern
- Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren

Hersteller:

EUROSIREL S.p.A
Via Volta 23
20019 Settimo M.se (MI) Italy 0051

Vertrieb:

DISTRICON GmbH
Am Joseph 15
D-61273 Wehrheim

Stand der Information: 2019.01



340_REV01/2019.01