


# ZECKIE

## DER ZECKEN-ENTFERNER PROFI

Mit ZECKIE dem Zeckenentferner-Stift haben Sie eine sichere und einfache Möglichkeit, Zecken schnell und vollständig aus der Haut zu entfernen.

Zecken sind Überträger von Krankheitserregern wie der FSME und der Borreliose. Wird die Zecke gequetscht, besteht die Möglichkeit Krankheitserreger in der Einstichstelle aufzunehmen. Mit ZECKIE wird dieser Vorgang weitgehend verhindert.

Durch den praktischen Clip und das handliche Format ist ZECKIE leicht zu tragen und stets zur Hand.

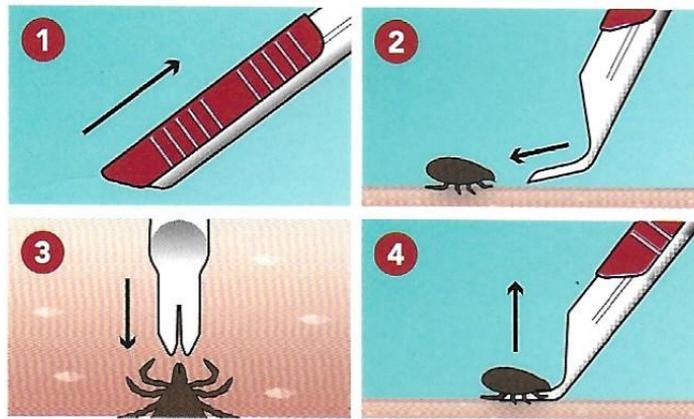

### Gebrauchsanweisung

1. Schieben Sie die Schutzkappe so weit zurück, bis die Fangspitze sichtbar wird.
2. Führen Sie ZECKIE vorsichtig an die Zecke heran.
3. Schieben Sie den Fangschlitz zwischen Haut und unter die Zecke.
4. Heben Sie nun den Stift an und ziehen Sie die Zecke heraus.

### Hinweise:

- Die betroffene Hautpartie sollte nach dem Entfernen der Zecke gründlich desinfiziert werden.
- Bitte beobachten Sie die Einstichstelle nach dem Entfernen der Zecke genau. Sollte sich trotz der schonenden Entfernung ein roter Ring bilden, gehen Sie zu einem Arzt.

ALMA ist ein eingetragenes  
Markenzeichen der Firma:

TOOLTEC GmbH  
Bahnhofstraße 57a  
D-28844 Weyhe

