
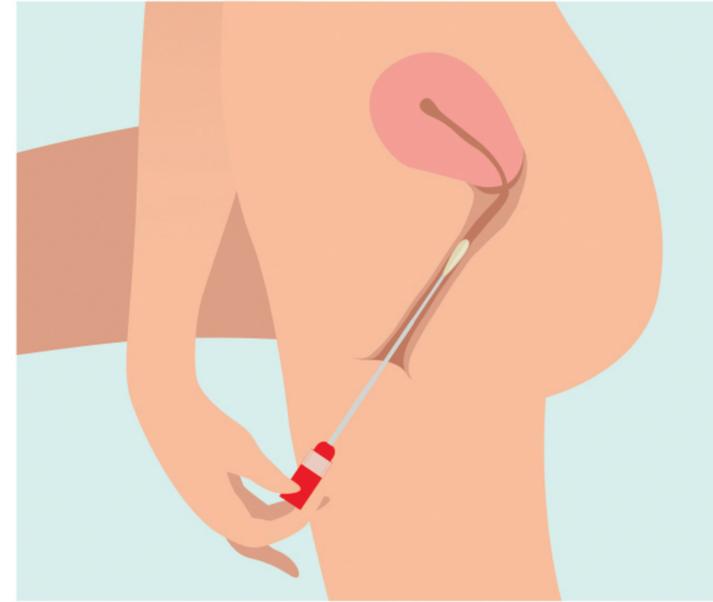


# Gebrauchsanweisung

**Bitte beachten Sie!** Es kann lediglich **eine Probe zur Analyse eingeschickt** werden (also entweder ein Urinsammelröhrchen oder ein Wattestäbchen im Sammelröhrchen). Falls beide eingeschickt werden, wird nur das Wattestäbchen im Sammelröhrchen analysiert.

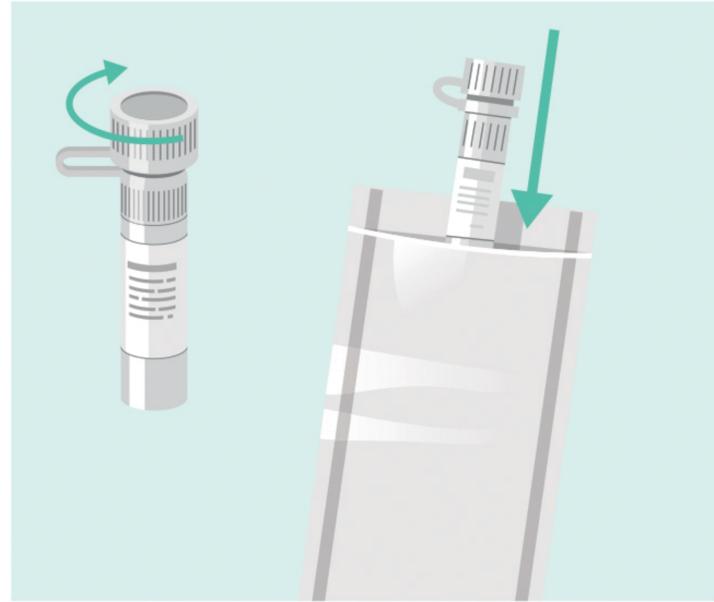

## Für Männer Abnahme einer Erststrahl- urin-Probe

Fangen Sie eine kleine Menge Ihres Erststrahlurins (15 – 20 ml) in einem Becher auf. Tun Sie dies vorzugsweise morgens nach dem Aufstehen (nachdem Sie minimal für 2 Stunden kein Wasser gelassen haben).

Nehmen Sie mit der beigefügten **Urinpipette A** ca. 1,25 ml Urin auf und transferieren Sie es in das beigefügte Urinsammelröhrchen **B**.  
**Verschließen Sie anschließend das Urinsammelröhrchen sorgfältig und legen Sie es in den Absorptionsbeutel D.**

## Für Frauen Abnahme einer vaginalen Probe

Für die vaginale Probe benutzen Sie das **Wattestäbchen mit Sammelröhrchen C**. Holen Sie das Wattestäbchen aus dem Sammelröhrchen heraus. Hierbei bricht die Versiegelung. Nehmen Sie eine bequeme Haltung ein; sitzend oder stehend, ähnlich, wie wenn Sie einen Tampon einführen. Spreizen Sie mit

einer Hand die Schamlippen, sodass die Vagina zugänglich wird. Führen Sie das Wattestäbchen ca. 2 – 5 cm tief in die Vagina ein und drehen Sie es für 10 – 15 Sekunden herum entlang der Scheidenwände. Ziehen Sie das Wattestäbchen gerade aus der Scheide heraus und stecken Sie es zurück in das Sammelröhrchen. **Drücken Sie die rote Schutzkappe sorgfältig auf das Sammelröhrchen.**

**Wichtig:**  
**Vergessen Sie nicht, Ihre Probe nach der Abnahme mit Ihrem einmaligen, anonymen Code zu versehen!**

