
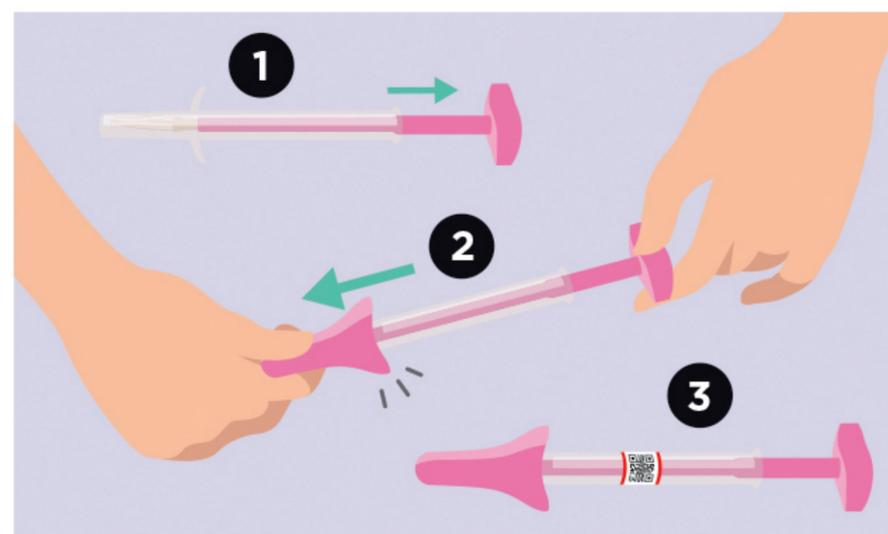
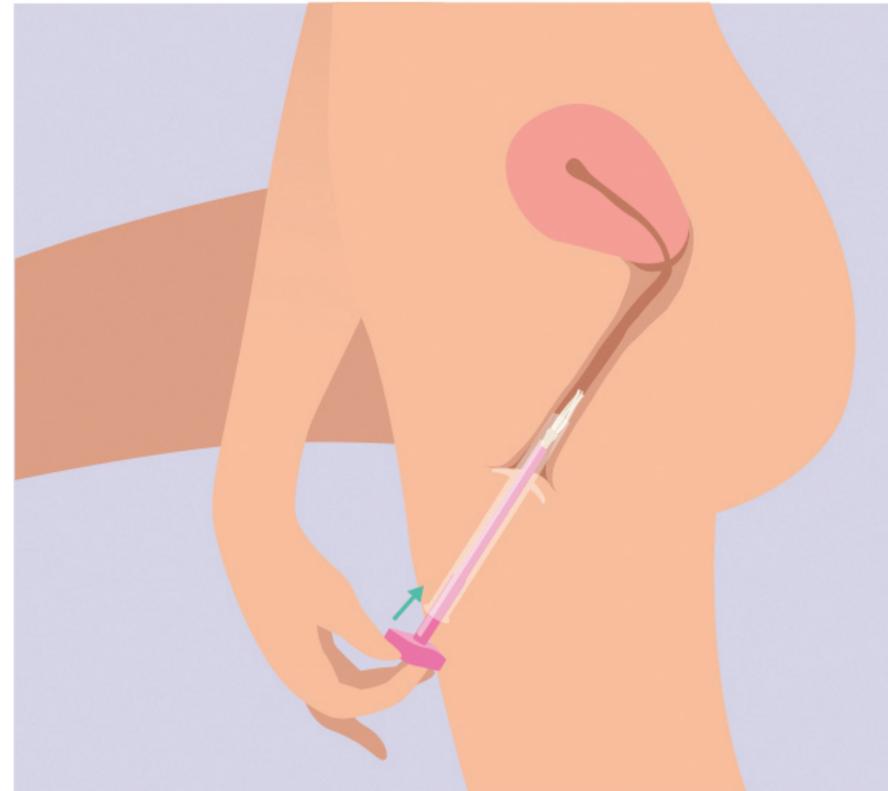


Gebrauchsanweisung

Inhalt dieser Verpackung

Bitte beachten Sie! Trotz umfangreicher Qualitätskontrollen kann es vorkommen, dass ein Einzelteil fehlt. Bevor Sie Ihre Probe abnehmen: Kontrollieren Sie bitte den Packungsinhalt auf Vollständigkeit. Sollte etwas fehlen, nehmen Sie bitte Kontakt auf via info@thuistesten.com.

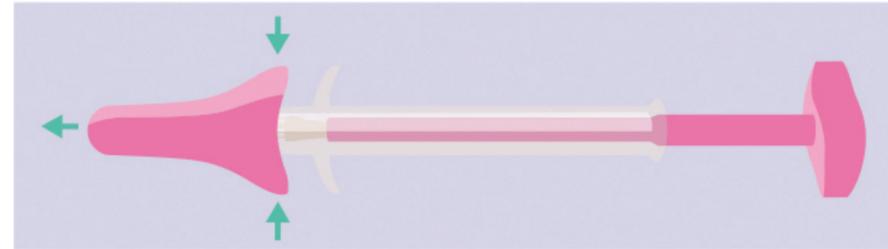

Für Frauen

Abnehmen einer vaginalen Probe

Zur Abnahme der vaginalen Probe benutzen Sie die **Brush A**. Entfernen Sie die rosane Schutzkappe von der Brush, indem Sie sie am breiten Teil leicht zusammendrücken und abziehen. Nehmen Sie eine bequeme Haltung ein – sitzend oder stehend – ähnlich, wie wenn Sie einen Tampon einführen. Spreizen Sie mit einer Hand die Schamlippen, sodass die Vagina zugänglich wird. Führen Sie die Brush so weit in die Vagina ein, bis die Flügel die Schamlippen berühren. Drücken Sie anschließend den rosa Stift nach vorne bis Sie ein Klicken hören. Drehen Sie den rosa Stift 5 x in dieselbe Richtung; nach jeder Umdrehung hören Sie ein Klicken. Entfernen Sie die Brush aus der Vagina und ziehen anschließend den Stift zurück **1**, wodurch das Pinselchen nicht mehr sichtbar ist. **Drücken Sie die Kappe kräftig auf die Brush 2** und kleben Sie Ihren QR-code auf die Brush **3**.

Wichtig: Vergessen Sie nicht, Ihre Probe nach der Abnahme mit Ihrem einmaligen, anonymen Code zu versehen!